

**Produkt: RETMEX Bariatrie
Rettungs-/Bergungstuch**

Artikel-Nr.: TN201



Wenn Gewicht, Umfang und Einsatzdruck zusammenkommen, zählt Ausrüstung, die entlastet und strukturiert. Das RETMEX Rettungs-/Bergungstuch - Bariatrie Modell wurde für den Transport bzw. die Rettung größerer/adipöser Personen entwickelt und unterstützt ein koordiniertes Vorgehen mit mehreren Helfern - vom schnellen Umsetzen bis zur Evakuierung aus schwer zugänglichen Bereichen.

Mit 220 x 120 cm mit 18 Griffen und einer extra stabilen Ausführung (u.a. 36 Crossboxen, verstärkte Griffe, Fußtasche) ist das Rettungstuch auf Teamarbeit ausgelegt. Die feuerhemmende Materialeigenschaft ist nach DIN 4102-1 (Klasse B1 & B2) geprüft; die sichere Arbeitslast beträgt bis zu 385 kg (nach DIN 1865-1).

Merkmale & Vorteile

- ✓ Maße: Rettungstuch ca. 220 x 120 cm, Fußtasche ca. 40 x 120 cm.
- ✓ Mehr Kontrolle im Team: bis zu 18 Griffe für sauberes, koordiniertes Tragen/Umsetzen. Griffanordnung: pro Seite links und rechts jeweils sieben Griffe, am Kopf- und Fußende jeweils zwei.
- ✓ Hohe Belastbarkeit: bis 385 kg (nach DIN 1865-1).
- ✓ Stabile Konstruktion: 36 Crossboxen und verstärkte Griffe für zusätzliche Festigkeit und Grip. Kreuzvernahte Gurtbänder auf der Rückseite sorgen für eine optimierte Kraftverteilung.
- ✓ PVC-Schläuche an den Griffen reduzieren Druckstellen und verhindern ein Einschneiden in die Handflächen (für mehr Grip und Führung).
- ✓ Fußtasche/Fußsack zur Stabilisierung und um ein Herausrutschen zu verhindern.
- ✓ Feuerhemmend geprüft: getestet nach DIN 4102-1 (Klasse B1 & B2).
- ✓ Standardmäßig inkl. grüner Tragetasche.
- ✓ Gewicht: 3 kg inkl. Tragetasche.
- ✓ 1 Jahr Garantie auf Material-/Produktionsfehler (gemäß Bedingungen).
- ✓ Das Rettungstuch kann mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln leicht gereinigt werden.

Material

Polyester und PU


Feuerhemmung

DIN 4102-1 (Klasse B1 & B2)

Produktmerkmale

Größe	ca. 220 x 120 cm
Farbe	Grün / schwarzes Gitter
Produziert in	Europa / lieferbar ab Lager Hamburg

Pflege- und Waschhinweise

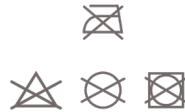

Für die manuelle Reinigung des RETMEX Rettungstuchs tragen Sie zunächst Schutzhandschuhe. Entfernen Sie anschließend grobe Verschmutzungen mit einem Einmaltuch bzw. einem leicht angefeuchteten Tuch. Die glatte Außenhülle kann mit jedem Flächendesinfektionsmittel (Flächendesinfektion als Spray oder als Wischdesinfektion und Wischtuch) gereinigt und desinfiziert werden. Durch gründliches Wischen wird das RETMEX Rettungstuch hygienisch aufbereitet; reinigen Sie dabei konsequent auch Griffe, Nahtbereiche und die Fußtasche. Im Anschluss lassen Sie das Rettungstuch vollständig trocknen, um Geruchsbildung zu vermeiden, und führen vor dem Verstauen eine kurze Sichtprüfung auf Beschädigungen an Material, Nähten und Griffen durch.

Vermeiden Sie unbedingt den Einsatz von Hochdruckreinigung (Material-/Nahtschäden möglich).

Nicht maschinenwaschbar. Nicht bleichen und nicht in den Trockner geben. Nicht bügeln. Nicht trocken reinigen. Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Vor Gebrauch stets prüfen. Nicht in kontaminiertem Zustand liegen lassen, sondern sofort abwischen. Bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneninstrahlung aufbewahren.



Für wen ist dieses Produkt geeignet?

Ideal für Organisationen, die bariatrische Transfers und Evakuierungen sicher abbilden müssen:

- ✓ Rettungsdienst / Sanitätsdienst, Feuerwehr, Rettungsteams,
- ✓ Kliniken und Gesundheitseinrichtungen (Transfer/Umsetzen, Evakuierung),
- ✓ unwegsames Gelände (z.B. Wald/Nationalpark/Dünen), wo z.B. keine Tragen einsetzbar sind.

Vertrieb in Deutschland, Österreich und Schweiz durch:

siNpress® GmbH

Wellingsbüttler Weg 79 | D-22391 Hamburg

📞 +49 40 536 30 788 | ☎ +49 40 600 99 252

info@siNpress.de | www.siNpress.de

siNpress